

BLIMO

ANVÄNDARMANUAL – BLIMO X-1400 PREMIUM



1 Säkerhet

X-1400 Premium ska endast användas av en person som inte lider av något tillstånd som försämrar synen, hörseln, synförmågan eller förmågan att reagera på plötsliga förändringar i omgivningen. Om du lider av något av ovanstående rekommenderas att du rådfrågar din läkare innan du använder X-1400 Premium.

- Kör endast över hinder och upp på trottoarkanter vid den lägsta punkten och i rät vinkel.
- Plötsliga svängar eller hastighetsförändringar rekommenderas inte.
- Undvik branta ytor om det finns risk för sladd på grund av isiga eller våta ytor.
- Undvik att köra på lösa underlag som grus.
- Kör alltid rakt uppför backar, dvs. kör inte i zickzack.
- Vänd inte X-1400 Premium på lutande ytor.
- Kör inte X-1400 Premium nedför trappor.
- Kör alltid framåt nedför lutningar, trottoarkanter och andra hinder.

1.1 Anti-tipp hjul

X-1400 Premium är utrustad med bakre tippskyddshjul. Dessa är en säkerhetsanordning som aldrig bör användas under normal drift. De är utformade för att förhindra att X-1400 Premium tippar bakåt på branta backar. Om du upptäcker några skador på hjulen ska du sluta använda scootern och ta den till en certifierad mekaniker som kan kontrollera att chassit inte har skadats.

1.2 Säkra lutningar

X-1400 Premium kan utan fara klättra i lutningar på upp till 12° . I denna 12° lutning kan X-1400 Premium stanna, bromsa och svänga. Det är möjligt att försöka köra i brantare lutningar, men vi rekommenderar starkt att du inte gör det. För att minska risken för att tippa bakåt i lutningar, minska belastningen på scooterns bakre del genom att skjuta fram sätet så mycket som möjligt och luta dig framåt.



Figur 1 – Rekommenderade lutningar

2 Inledning

Din X-1400 Premium är en högteknologisk mobilitetsutrustning som kommer att ge dig många års trogen tjänst och glädje. Denna manual introducerar dig till drift, underhåll och skötsel av din X-1400 Premium. Om du har några frågor eller är osäker på något, vänligen kontakta återförsäljaren där du ursprungligen köpte din X-1400 Premium. Allt underhållsarbete ska utföras av en auktoriserad återförsäljare eller en certifierad mekaniker.

3 Din X-1400 Premium

3.1 Avsedd användning

X-1400 Premium är avsedd för användning på jämna trottoarer eller vägar, i enlighet med lokala lagar. X-1400 Premium kan användas i vått och blåsigtt väder, men försiktighet bör iakttagas när man planerar en resa i ogynnsamma väderförhållanden. Om det finns mer än 1 cm vatten på trottoaren bör extra försiktighet iakttagas, eftersom scootern kan ha nedsatt grepp- och styrförmåga. Under inga omständigheter får mer än en person använda fordonet samtidigt.

3.2 Oavsiktlig rörelse


Innan du stiger på ska X-1400 Premium alltid vara stillastående. När X-1400 Premium slås på förblir den stillastående tills något av följande inträffar:

1. Framåt- eller bakåttreglaget dras.
2. Frihjulsfunktionen aktiveras.

Försök inte manövrera fordonet från utsidan.

Om fordonet är i rörelse kan en nödbromsning utföras genom att släppa gasreglagen och dra kraftigt i den handmanövrerade bromsspaken på styrstångens högra sida.

4 Digital styrstångsguide

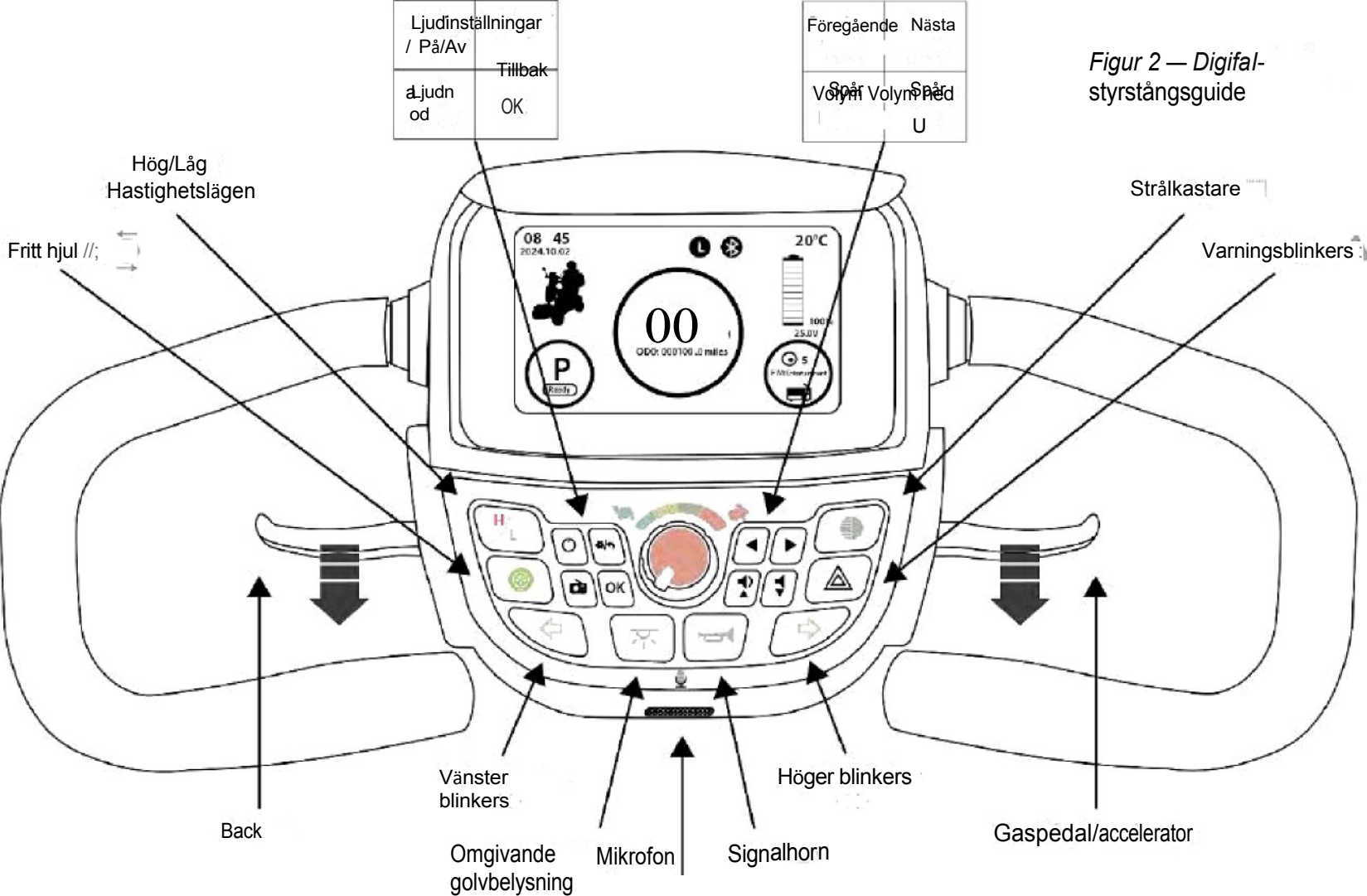

5 Användning av din X-1400 Premium


5.1 Nycklar och fjärrkontroller

X-1400 Premium levereras med två nyckellösa fjärrkontroller:



**Nyckelbrickor
x2**

De nyckellösa fjärrkontrollerna fungerar inom en radie av 10 meter från scootern.

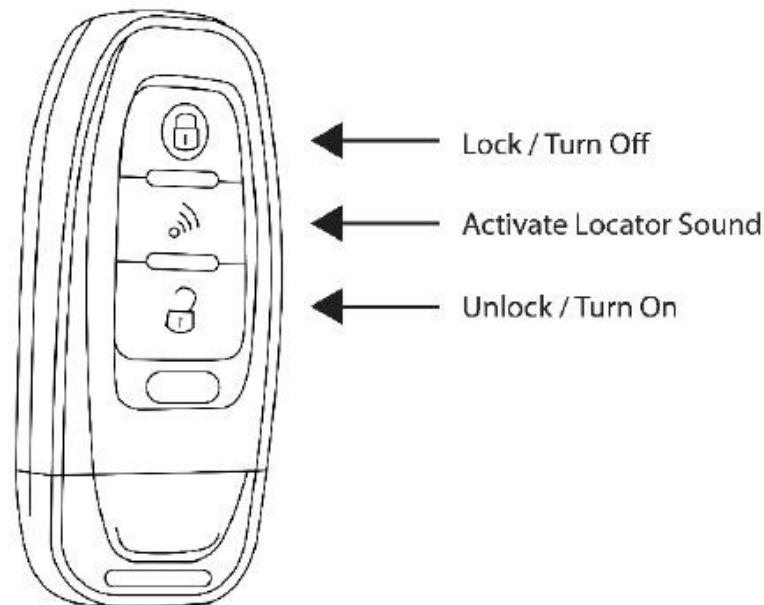

Starta

För att starta X-1400 Premium, sätt dig i förarsätet och tryck antingen på knappen "Unlock/Turn On" på fjärrkontrollen eller på knappen "Start/Stop" på rattstången.

Stäng av

För att stänga av skotern trycker du på knappen "Lock/Turn Off" på fjärrkontrollen eller på knappen "Start/Stop" på styrstången.

Lokaliseringston

Om den nyckellösa fjärrkontrollen befinner sig inom räckvidden kan du använda den här funktionen för att lokalisera din skoter i en livlig miljö. När du trycker på knappen "Lokaliseringston" aktiveras ett högt ljud.

5.2 Sätjusteringar

Det är viktigt att justera sätet till en bra position som gör att du bekvämt kan manövrera alla fordonets reglage.

Framåt/bakåt


För att flytta sätet framåt eller bakåt, ta tag i den svarta spaken på höger sida under sätet medan du sitter ner.

Tryck hårt mot golvet med fötterna.


TOPPTIPS – Använd inte styrstången för att trycka eller dra dig upp.

Justering av ryggstödet

Sätets lutning kan ändras med hjälp av lyftspaken som sitter på höger sida av sätet när du sitter.

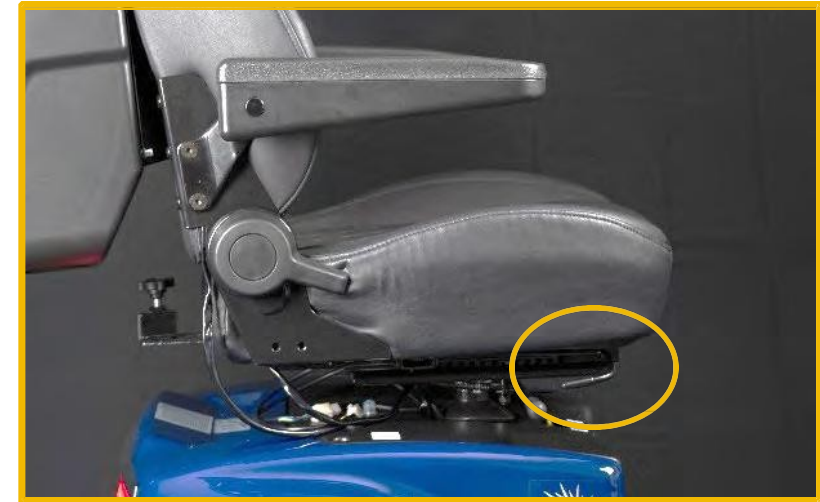

Figur 3 – Dra i den svarta spaken för att justera sittpositionen

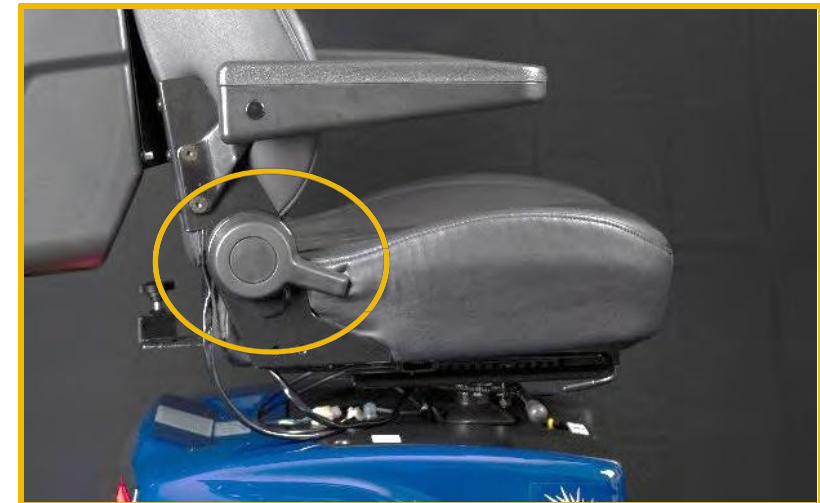

Figur 4 – Dra i det svarta handtaget för att justera ryggstödet

Justering av svängfunktionen

För att underlätta åtkomsten kan sätet vridas 90 grader.

För att ändra stolens vinkel, sätt dig på stolen, dra svänghandtaget mot scooters framsida och vrid stolen moturs.



Figur 5 – Dra i det svarta handtaget för att justera ryggstödet

5.3 Justering av styret

Styrstångens vinkel kan justeras genom att trycka ner spaken på styrstångens framsida.

Hela rorkultenheten kan sedan lutas framåt och bakåt för att hitta en bekväm körposition. Släpp spaken för att låsa din önskade position.

Tänk på att om du sänker styrstången för mycket kan det bli svårt att styra.

Försök att hitta en position som ger god sikt över den digitala kontrollpanelen och möjliggör full rörelse åt vänster och höger.



5.4 Styrning

X-1400 Premium är utrustad med en mekanisk rattstång som helst ska manövreras med båda händerna. När X-1400 Premium står stilla kan styrningen kännas lite tung eller trög. Styrningen blir lättare när fordonet är i rörelse.

För mest exakt styrning bör X-1400 Premium röra sig framåt eller bakåt med en kontrollerbar hastighet. Tryck försiktigt ena sidan av styrstången bort från dig så att X-1400 Premium börjar svänga. Se till att du hela tiden observerar din omgivning under alla manövrer.

5.5 Acceleration och bromsning

5.5.1 Hastighetskontroller

X-1400 Premium har flera metoder för hastighetskontroll: hög- och låghastighetslägen samt maxhastighetsbegränsare.

5.5.1.1 Hög- och låghastighetslägen

Lägena för hög hastighet (H) och låg hastighet (L) styrs med H/L-knappen.

5.5.1.2 Maxhastighetsbegränsare

Den röda ratten styr hastigheten som du vill att scootern ska köra i eller anpassar din hastighet till någon som går. Denna funktion är särskilt användbar när du kör scootern i trånga utrymmen.

Vrid ratten medurs för att köra snabbare och moturs för att köra långsammare.



Figur 7 – H/L-hastighetslägeskontroll



Figur 8 – Begränsare för maximal hastighet

5.5.1.3 Gashandtag

Acceleration och retardation styrs med de röda och gröna spakarna på styret. De är utformade för att förhindra att både framåt- och bakåtfunktionerna aktiveras samtidigt.

För att köra framåt drar du försiktigt i det gröna spakhandtaget. X-1400 Premium accelererar upp till den maximala tillåtna hastigheten som ställts in med hastighetsreglagen. För att sakta ner eller stanna släpper du gasreglaget så stannar scootern. I en nödsituation kan handbromsen aktiveras genom att dra i bromshandtaget som sitter till höger om styret.

Backläget kan aktiveras genom att dra i den röda spaken när scootern står stilla. Mer information om backläget finns i 5.5.3 Backning.

5.5.2 Fribyrullningsläge

Du kan behöva flytta X-1400 Premium utan att motorn är igång. Detta gör du genom att hålla knappen "Freewheel" intryckt. Scootern måste vara påslagen och den digitala displayen tänd.

Håll knappen märkt med denna symbol intryckt:



Släpp knappen för att återaktivera bromsarna:

För din egen säkerhet ska du endast använda denna funktion på en plan yta. I frirullningsläge måste du vara försiktig när du manövrerar scootern, eftersom det inte finns någon bromsfunktion.

TOPPTIPS – I frirullningsläge fortsätter scootern att rulla om den skjuts.

5.5.3 Backning

För att aktivera backläget, se till att X-1400 Premium står stilla på jämn mark. Innan du kör, kontrollera att området är fritt från hinder och att den planerade vägen är tillräckligt stor.

Dra försiktigt i den röda spaken så börjar X-1400 Premium sakta backa. För att sakta ner eller stanna, släpp den röda spaken så stannar scootern. I en nödsituation kan handbromsen aktiveras genom att dra i bromshandtaget som sitter till höger om styret.

5.6 Starta X-1400 Premium

X-1400 Premium kan startas när nyckelbrickan befinner sig i närheten av scootern och start-/stoppknappen trycks in (figur 9).

X-1400 Premium är påslagen och klar att användas efter välkomstkärmen och när den digitala färgskärmen visar visuell data (figur 10).




Figur 9 – Start-/stoppknapp



Figur 10 – Digital instrumentpanel som visar data

5.7 Digital färgdisplay

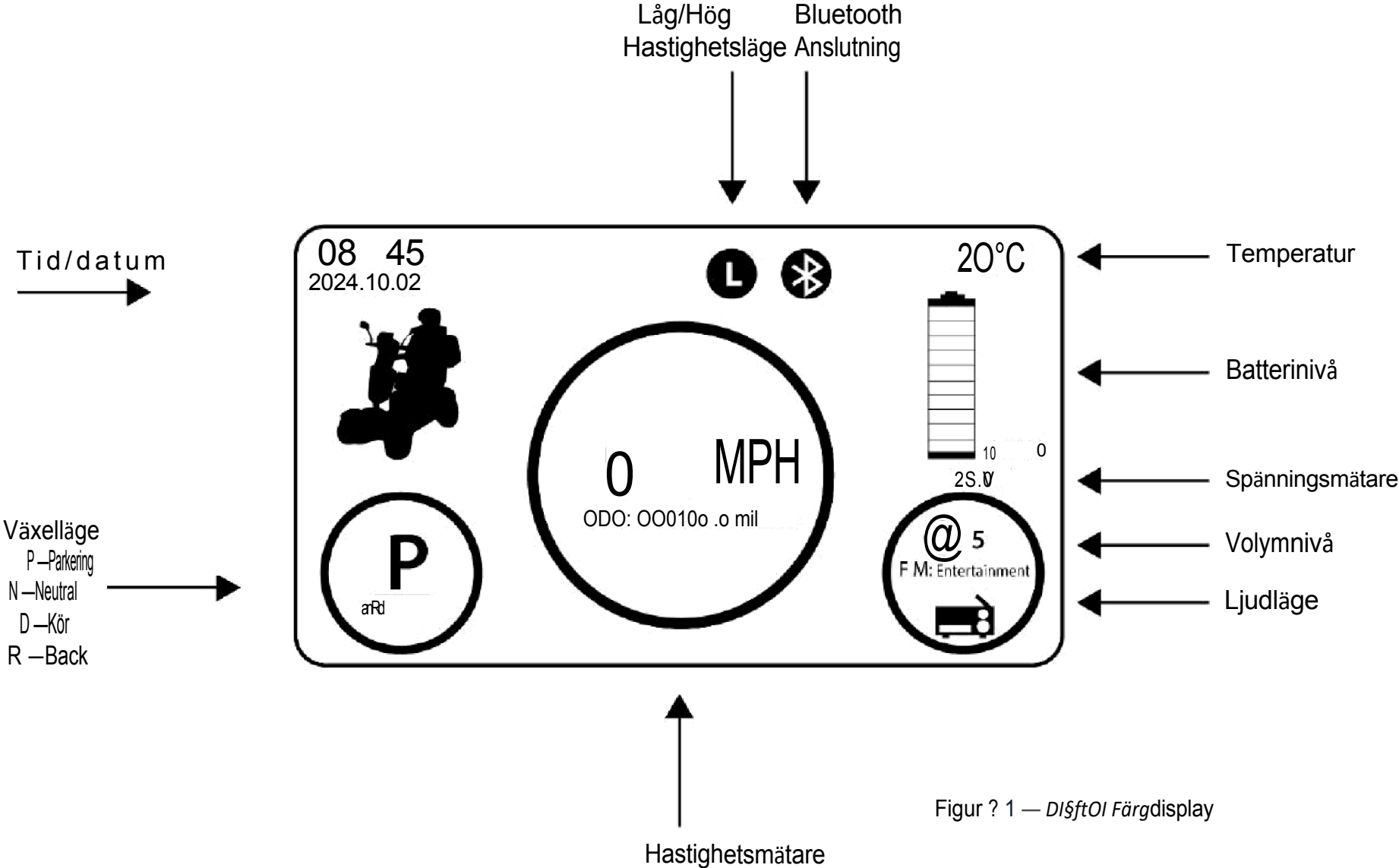

Figur ? 1 — D15ftOI Färgdisplay

5.7.1 Trippmätare

De mil som visas på den digitala färgdisplayen är ackumulerade och representerar den totala sträckan som skotern har kört.

5.7.2 Ställa in datum och tid

Följ instruktionerna nedan för att ställa in klockan:

1. Håll inställnings-/bakåtknappen intryckt i tre sekunder.
2. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "System", tryck på OK-knappen.
3. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "Lokal inställning", tryck två gånger på OK-knappen.
4. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "Tid och datum", tryck på OK-knappen.
5. Använd nedåtknappen ▼ för att välja år, månad, dag, timme eller minut och tryck på OK-knappen
6. Använd upp- och nedknapparna ▲ ▼ för att justera inställningen.
7. Tryck på OK-knappen ▲ ▼ för att bekräfta inställningen.
8. Om det behövs, upprepa steg 5-7 för att justera år, månad, dag, timme eller minut och justera.
9. Tryck på knappen Inställningar/Tillbaka för att återgå till huvuddisplayen.
10. Datum och tid kommer nu att ställas in.

5.8 Indikatorer

Blinkers är ljusstarka orangefärgade lysdioder som är lätta att se.

För att slå på dem trycker du en gång på antingen vänster- eller höger- knappen innan du påbörjar en manöver. När svängen är klar och det är säkert att göra det, trycker du på blinkersknappen igen för att stänga av blinkerslampan.

5.9 Varningsblinkers

I en nödsituation kan båda blinkersaktiveras samtidigt genom att trycka på blinkers fram och bak tills knappen trycks in igen.



. Då blinkar både vänster och höger

5.10 Horn


Den elektriska tutan aktiveras genom att trycka på knappen "  " på styrets ovansida. Tutan får endast användas i enlighet med trafikreglerna. Tutan ljuder endast om scootern är påslagen.

5.11 Bluetooth

X-1400 Premium har integrerad Bluetooth-anlutning och två högtalare inbyggda i styret. Mobila enheter

kan kopplas ihop med scootern för att spela musik och ljud:

1. Slå på scootern och Bluetooth på din mobila enhet
2. Navigera till Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet
3. Välj enheten med namnet "scooter" (se figur 13)
4. Ange pinkoden "0000" och anslut
5. När anslutningen är upprättad visas Bluetooth-ikonen på displayen (se figur 12).
6. För att spela upp ljud, gå till ljudappen på din mobila enhet och tryck på Spela upp
7. Justera volymen med knapparna Volym upp/Volym ned (se figur 2).
8. Hoppa till nästa eller föregående spår genom att trycka på vänster- och högerknapparna.

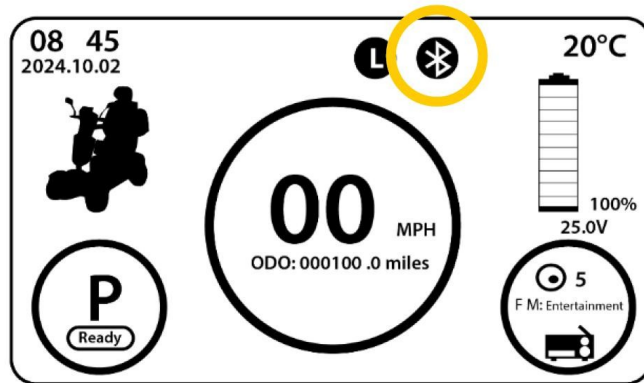

Figur 12 – Bluetooth-anlutning aktiv



Figur 13 – Bluetooth-telefoninställningar

6.13 USB-laddningsportar


X-1400 Premium är utrustad med USB-laddningsportar på höger sida av rattstången. **Port 1** sitter bredvid LED-lampan och **port 2** finns på höger sida.

USB-port 1: Endast dataport

Denna port kan användas för att spela upp ljudfiler från USB-minnen.

USB-port 2: Endast laddningsport

Denna port kan användas för att ladda mobiltelefoner och surfplattor.

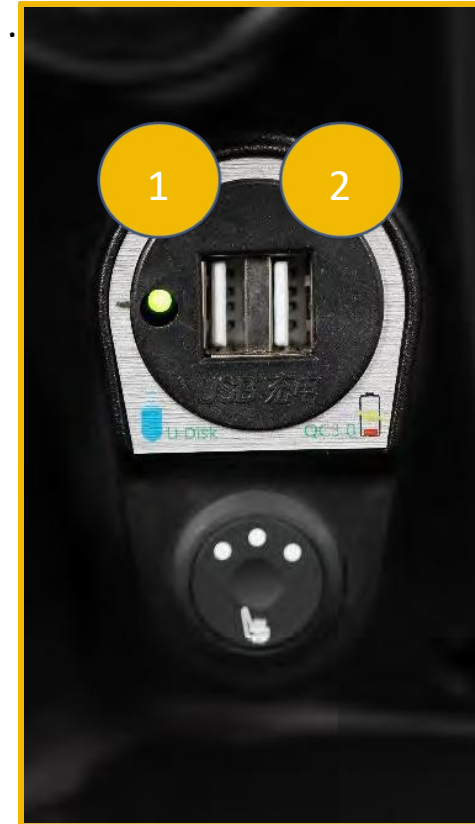

Figur 16 – USB-laddningsportar

6.14 Flask- och mobiltelefonhållare

För din bekvämlighet är X-1400 Premium utrustad med två formgjutna plastfästen. Använd dessa för att säkert förvara flaskdrycker och din mobiltelefon.

TOPPTIPS – Flaskhållaren ska inte användas för att förvara alkoholhaltiga drycker.



Figur 17 – Kopphållare och mobiltelefonhållare monterade på rorkulten

6.15 Väskhållare

Det finns en praktisk väskhållare integrerad i scooterns styrstång. Denna hållare kan användas för att förvara din personliga väska eller dina inköp.

För att komma åt klämman trycker du på hållarens undersida så skjuts klämman mot dig. Påshållaren klarar en **maximal vikt på 2,5 kg**.



Figur 18 – Påshållare

6.16 Laddningsport

X-1400 Premium kan laddas via laddningsporten på rattstången.

Porten sitter på styrstångens högra sida. För att ladda fordonet ansluter du bara den medföljande laddningskabeln till porten.

När X-1400 Premium är i laddningsläge går den inte in i körläge.

TOPPTIPS – För bästa resultat, se till att ladda batterierna efter varje användning. Du kan inte överladda dem eftersom laddaren stängs av automatiskt när den känner av att de är fulla.

Om du inte använder din scooter under längre perioder rekommenderar vi att du laddar batterierna minst en gång i veckan.

Detta säkerställer att de förblir i gott skick och är redo för regelbunden användning.



Figur 19 – Laddningsport
monterad på styret


7 Uppvärm� sits

För att aktivera funktionen för uppvärmd sits använder du knappen för uppvärmd sits som sitter under reglagen och huvudstyrstången. Det finns tre värmenivåer: låg, medel och hög.

Av



På

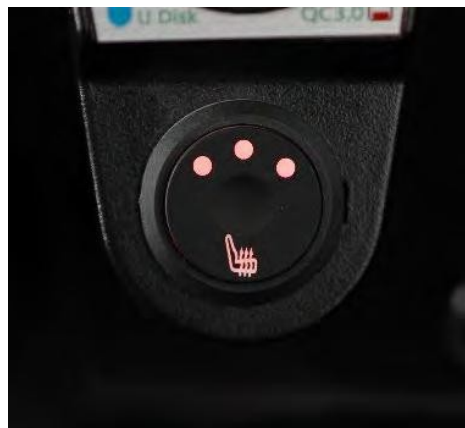

När knappens lysdioder inte lyser betyder det att sätesuppvärmningen är avstängd.

När knappen lyser betyder det att sätesuppvärmningen är på.
3 röda lysdioder = Hög
2 röda lysdioder = Medium
1 röd lysdiod = Låg



Figur 20 – Knapp för uppvärmd sits

8 Underhåll

8.1 Byta glödlampor

LED-lampor är energieffektiva och har lång livslängd, men kan så småningom behöva bytas ut. LED-lampor kan köpas från återförsäljaren som levererade din X-1400 Premium. Byte av lampor bör endast utföras av en auktoriserad återförsäljare, eftersom det innebär demontering av enheter som måste återförslutas enligt de ursprungliga tillverkningsspecifikationerna.

8.2 Batterivård

För att komma åt batterierna måste sätet tas bort. Innan du tar bort sätet måste du koppla bort båda anslutningarna till det uppvärmda sätet. För att ta bort sätet, ta tag i den svarta spaken på höger sida under sätet och dra den mot fordonets framsida. Sätet kan sedan tas bort genom att dra det rakt uppåt.

Batterierna i din X-1400 Premium bör inte kräva något dagligt underhåll, men det kan hända att du behöver komma åt dem. Batterierna sitter under sätet, skyddade av en svart plastkåpa som är fastsatt med sex skruvar.


När underhållet är klart, se till att skruvarna används för att sätta tillbaka batteriluckan ordentligt. Sätt tillbaka sätet och se till att det är låst på plats.

8.3 Säkringar

Säkringarna som används på X-1400 Premium är tillgängliga via en täckt lucka på framsidan av styrstången. För att komma åt säkringspanelen drar du bara ner fästklämman och skjuter bort locket. Säkringar bör endast bytas av professionella, eftersom felaktigt arbete kan skada det elektriska systemet.



**Figur 21 –
Säkringsboxens
placering**

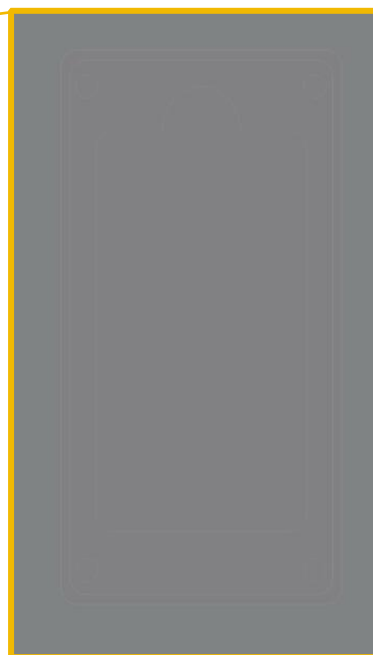

Figur 22 – Säkringstavlans lock

8.4 Däcktryck

Däcken på X-1400 Premium är utformade för att ge en bra balans mellan komfort och energieffektivitet. Felaktigt pumpade däck kan leda till dålig hantering, minskad räckvidd och ökat slitage. Däcken ska alltid ha minst 3 mm mönsterdjup för att ge tillräckligt grepp på vägytan. Om däcken blir slitna ska de bytas ut innan X-1400 Premium används igen.

Däcktryck fram: 35 psi

Däcktryck bak: 35 psi

8.5 Rengöring och underhåll

8.5.1 Gummimattor

Gummimattan ska rengöras med en dammsugare med en möbelborste. För fläckar kan en mild blandning av möbelsåpa och vatten användas, men se till att området torkas ordentligt efteråt.

TOPPTIPS – Använd inte blekmedel.

8.5.2 Lack

För att ta hand om lacken, tvätta X-1400 Premium regelbundet med mjuka trasor och ett mildt bilschampo. Applicera bilpolish för att få en högblank yta. Det rekommenderas starkt att polish appliceras på områden där lacken kan utsättas för ogynnsamma väderförhållanden.

TOPPTIPS – Använd aldrig kokande vatten för att rengöra X-1400 Premium.

9 Garanti

X-1400 Premium levereras med 12 månaders tillverkargaranti när den köps ny från en auktoriserad återförsäljare. Under garantiperioden repareras alla delar som blir defekta på grund av tillverknings- eller materialfel av den återförsäljare där produkten köptes. Om reparationen inte kan genomföras kommer en ersättningsdel att monteras.

Om ett tillverkningsfel upptäcks måste detta rapporteras skriftligen till den återförsäljare där X-1400 Premium köptes inom 28 dagar efter köpet.

Produkter som anses ha en begränsad livslängd, inklusive batterier och däck, omfattas inte av garantin om de anses ha utsatts för överdriven slitage eller felaktig användning.

Garantin täcker inte skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten, eftermarknadsmodificeringar eller oavsiktliga skador. Garantin är inte överlåtbar.

Garantin omfattar inte följdkostnader som uppstår till följd av felavhjälpning, frakt- och resekostnader, inkomstbortfall, utgifter etc.

Tillverkaren tar inte ansvar för skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.

10 Specifikationer

10.1 Tekniska specifikationer

Motor	Bakhjulsdrift, förseglad transaxel 1400 W, 24 volt likström	Batterier	Dubbla 12 V 75 Ah eller 100 Ah
Instrumentpanel	Digital färgdisplay 16- knapps styrspak Maxhastighetsreglage	Däck	Pneumatiska

10.2 Storlekar och vikter

Längd	1660–1800 mm
Bredd	800 mm
Höjd	1450 mm
Motoreffekt	1400 W
Styrenhet	PG200A
Bromsar	Elektromagnetiska/hydrauliska
Vikt	130 kg (utan batterier)
Viktkapacitet	205 kg
Markfrigång	110 mm (utan last)
Framhjul	14 tum pneumatiska däck
Bakhjul	16 tum pneumatiska däck
Maximal lutning	15 grader
Vändradie	1800 mm

1 Internationella hastigheter: Tillgängliga beroende på jurisdiktion och lokal lagstiftning.

2 Räckvidden kan variera beroende på batteriets laddning/skick/tillval, terrängtyp, däckens skick och fordonets last.

3 På grund av tillverknings toleranser och kontinuerlig produktförbättring kan dessa specifikationer variera med +/-3 %.

4 Varierar beroende på användarens vikt, terrängtyp, batteriladdning, batteriets skick och däckens skick.